

فاكوتكس™، ضمادات ذات مفعول شعري سريع، 5 × 5 سم، 2 × 2 بوصة VAC005005
 فاكوتكس™، ضمادات ذات مفعول شعري سريع، 10 × 10 سم، 4 × 4 بوصة VAC010010
 فاكوتكس™، ضمادات ذات مفعول شعري سريع، 10 × 15 سم، 4 × 6 بوصة VAC010015
 فاكوتكس™، ضمادات ذات مفعول شعري سريع، 10 × 20 سم، 4 × 8 بوصة VAC010020
 فاكوتكس™ لفافة، ضمادات ذات مفعول شعري سريع، 100 × 10 سم، 4 × 40 بوصة VAC010100
 فاكوتكس™ تصريف، ضمادات ذات مفعول شعري سريع، 1 × 40 سم، 0.4 × 16 بوصة VAC001040

يسهل الشفاء عن طريق تحسين مستويات الأكسجين وتقليل مستويات الإفرازات والوذمة داخل وحول الجروح التي يصعب شفاؤها.

الغرض من الاستخدام

تُستخدم ضمادات فاكوتكس™ التصريف وضمادات اللف ذات المفعول الشعري السريع، في علاج الجروح المتوسطة إلى الشديدة الإفراز، والجروح ذات المخاط السميك الملتصق، والجروح العميقة أو غير المنتظمة أو المتقوية، أو الجروح التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك الجروح التي تحتوي على مخاط، والجروح النخرية وجروح التجويف/الجيوب الأنفية.

تشمل المؤشرات السريرية لفاكوتكس™ تقرحات السكري، والساق الوريدية، وتقرحات السرير، وأيضاً الجروح الحادة أو المغلقة أو الجراحية مع مشاكل الوذمة.

الأوصاف

يتم تصنيع ضمادات فاكوتكس™ ذات المفعول الشعري السريع من مزيج من ثلاث طبقات من عناصر البوليمير والقطن المنسوجة معاً وفقاً لمواصفات براءة الاختراع. يقوم فاكوتكس™ بسحب وامتصاص الصديد والأنسجة الميتة والإفرازات من الجرح داخل الطبقة الوسطى من الضماد. عندما تنتسج الطبقة الوسطى، ينتقل السائل الزائد بعيداً عن الجرح إلى الطبقة الثالثة. يعزز فاكوتكس™ المفعول الشعري السريع على اتجاهات الجروح، مما يؤدي بشكل فعال إلى رفع ونقل وإزالة الإفرازات الزائدة من الجرح / السوائل الداخلية بعيداً عن سرير الجرح. يعمل فاكوتكس™ عن طريق سحب ونقل الإفرازات (المحملة بالبكتيريا) بعيداً عن طبقة الجرح، مما يترك الجرح في وضع يسمح له بالشفاء من الداخل. إنه ضماد بسيط وفريد ومبتكر للجروح كطريقة أولية لتغطية الجرح، مع إمكانية الاستخدام عبر مجموعة واسعة من الجروح.

الفائدة السريرية

تعتبر الضمادات ذات المفعول الشعري مفيدة بشكل خاص في حالات الجروح المتوسطة إلى شديدة الإفراز، حيث يمكن أن يكون المخاط سميكاً ودهنياً في مثل هذه الحالات تكون هناك حاجة لإزالة السوائل الجرح الزائدة أو الإفرازات من الجرح مع الحفاظ على الرطوبة الكافية لعملية شفاء الجرح. يمكن أن تكون الجروح غير المنتظمة الشكل، أو العميقة، أو المتدهورة، أو الموجودة في أماكن يصعب الوصول إليها في الجسم، أكثر تعقيداً في العلاج. يجمع فاكوتكس™ بين ضمادات ذات مفعول شعري سريع متعدد الاتجاهات ومفعول تصريف مصمم لعلاج الجروح التي يصعب شفاؤها والتي تحتوي على كميات معتدلة إلى كبيرة من الإفرازات والمخاط.

موانع الاستخدام

لا تستخدم على نزيف الشرايين أو الجروح العائنية الليفية أو الجروح التي تنزف بشدة. في حالة وجود جروح شديدة العدوى، استخدم علاجاً جيداً مضاداً للميكروبات قبل وضع فاكوتكس™ على الجرح.

التحذيرات والتنبيهات

- إن فاكوتكس™ مخصصة للاستخدام مرة واحدة فقط. إن فاكوتكس™ ليس جهازاً قابلاً للزرع. لا تقم بإعادة استخدامها. لا تستخدم فاكوتكس™ في حالة تلف غلاف الكيس.
- إن فاكوتكس™ عبارة عن ضماد قليل الالتصاق، ولكنه يصبح ضماداً ملتصقاً عندما يصبح الجرح غير رطب.
- لا ينبغي استخدام فاكوتكس™ مباشرة على الجروح النخرية الجافة وعلى الجروح منخفضة الإفراز، لأنه في هذه الحالات قد يلتصق طبقة الجرح ولا تكون خصائصه في نقل المفعول الشعري ذات صلة بمستوى رطوبة الجرح.
- لا ينبغي استخدام فاكوتكس™ مع المواد الهلامية أو ضمادات الفازلين السميكة، لأن هذه المواد سوف تسد القنوات الشعرية الدقيقة.
- في حالة الجروح التي تتعلق بالعظام وأ/أو الأوتار، يجب استخدام فاكوتكس™ بحذر شديد ويجب وضع طبقة اتصال غير ملتصقة.
- لا تستخدم أبداً ضماداً طبائقياً أو رقائق معدنية فوق ضماد فاكوتكس™، وإلا سيؤدي ذلك إلى حدوث نزع حول الجرح.
- تصل مدة الارتداء الموصى بها للضماد إلى ثلاثة أيام.
- لا يحتوي الضماد على أي مواد مضافة و(لا جسيمات نانوية) أو أدوية ولا يسبب أي ردود فعل سلبية معروفة.

إجراءات الاستخدام

- يمكن تطبيق فاكوتكس™ من أي من الجانبين. لا يوجد جانب صحيح وجانب خاطئ. بمجرد ملاصقة الضماد للإفرازات الموجودة في الجرح، يصبح فاكوتكس™ أحادي الاتجاه.

- يمكن وضع طبقات متعددة حسب عمق الجرح وحجم الإفرازات.

- يعد الاتصال المباشر بسرير الجرح أمراً ضرورياً.

- يمكن قصه وتشكيله حسب الحجم ليناسب الاحتياجات الدقيقة لكل جرح.

- استخدم دائماً مقصاً حاداً للقطع، ثم قصه حسب الحجم بحيث يتناسب مع سرير الجرح، مع ترك 2 إلى 3 مم بين حافة الضماد وحدود الجرح. في الجروح العميقة، قم بتكديس طبقات كافية من فاكوتكس™ حتى تصل إلى مستوى الجدار المحيط. ثم قم بتغطيتها بطبقة أخيرة من فاكوتكس™ على كامل مساحة الجرح، بحيث تتداخل مع حدود الجرح. قم بالتنظيف باستخدام ضماد تثبيت داعم، وبسيط وغير طبائقي.

- اعتماداً على مدى رطوبة الجرح، ضع ضماداً (فائق) الامتصاص فوق ضماد فاكوتكس™ لتخزين الإفرازات عندما يصبح الضماد (فائق) الامتصاص مشبع، ضع ضماداً جديداً فوق ضماد فاكوتكس™، وارتك ضماد فاكوتكس™ في مكانه لمدة 3 أيام كحد أقصى.

- لا تستخدم أبداً طبقة ملاصقة للجرح دهنية غير ملتصقة أو كريم يحتوي على جزيئات الفازلين أو المحتوى الدهني لأنها قد تغلق القنوات الشعرية للضماد، وبالتالي تقلل من وظائفه.

- عندما تكون العدوى موجودة في الجروح العميقة، فإن المفعول الشعري السريع سيساعد على سحب العدوى من الأنسجة العميقة. في البداية قد يؤدي هذا إلى ما يبدو أنه سرير جرح أكبر. ومع ذلك، مع استمرار مفعول الشعيريات الدموية، سيحسن مظهر سرير الجرح. قم دائماً بدمج فاكوتكس™ مع العلاج المضاد للميكروبات في الجروح المصابة لزيادة تأثير الضمادات.

- أذكر للمريض أنه قد يشعر بشعور طفيف بالسحب في الأيام القليلة الأولى بعد وضع الضماد، وذلك بسبب قوة الشفط للضماد. - قم بتأمينه باستخدام ضماد غير طبائقي شفاف أو داعم.

دليل سريع خاص بالتأثيرات غير المرغوب فيها

يجب على العملاء الاتصال بممثل Protex Healthcare بخصوص أي تأثيرات غير مرغوب فيها أو حوادث خطيرة تتعلق بهذا المنتج.

منتج حاصل على براءة الاختراع VCSTIFUA.002

ديسمبر 2023.

Quick guide >

المصنع	
الكبيرة	
التكولوج برقم	
علامة CE	
رقم المجموعة	
جهاز طبي	
تاريخ انتهاء صلاحية المنتج	
تحذير	
تاريخ التصنيع	
راجع تعليمات الاستخدام	
يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس	
لا تقم بإعادة استخدامه	
حافظ عليه جافاً	
تم التعقيم بواسطة أشعة جاما	
لا تقم بإعادة التعقيم	
لا تستخدمه إذا كانت العبوة تالفة	
حالة درجة حرارة التخزين	
يحفظ في درجة حرارة بين 0 و 30 درجة مئوية	
حالة درجة حرارة النقل	
يتم النقل بين -30 درجة و+60 درجة مئوية	

Protex Healthcare NV,
 Blommestraat 2,
 8800 Roeselare, Belgium. 2696
 www.protexhealthcare.com
 info@protexhealthcare.com